

DE Dosierplan für Konzentrate

EN Dosing plan for concentrates



**FD 300
FD 312**
Flächen-Desinfektion
Surface disinfection



FD 370 cleaner
Praxisreiniger
Surgery cleaning



ID 212, ID 212 forte, ID 213
Instrumenten-Desinfektion
Instrument disinfection
ID 215
Enzymatischer Instrumenten-Reiniger
Enzymatic instrument cleaner



Orotol® plus
Sauganlagen-
Desinfektion
Suction system
disinfection



MD 555 cleaner
Spezialreiniger für Sauganlagen
Special suction cleaner

Gebrauchslösung Quantity of solution required	1 %		2 %		5 %	
	ml	Verschusskappe ¹⁾ No. of cap fulls ²⁾	ml	Verschusskappe ¹⁾ No. of cap fulls ²⁾	ml	Verschusskappe ¹⁾ No. of cap fulls ²⁾
1 Liter/litre	–	–	20	1	–	–
2 Liter/litres	20	1	40	2	100	5
3 Liter/litres	–	–	60	3	–	–
4 Liter/litres	40	2	80	4	200	10
5 Liter/litres	–	–	100	5	–	–
6 Liter/litres	60	3	120	6	300	15
7 Liter/litres	–	–	140	7	–	–
8 Liter/litres	80	4	160	8	400	20
9 Liter/litres	–	–	180	9	–	–
10 Liter/litres	100	5	200	10	500	25

¹⁾ Verschussintegrierter Dosierer 20 ml. Dosierer innen bis zur ringförmigen Markierung befüllen.

²⁾ Caps should be filled to the 20 ml line marked inside.



**FD 300
FD 312**
Flächen-Desinfektion
Surface disinfection



FD 370 cleaner
Praxisreiniger
Surgery cleaning



ID 212, ID 212 forte, ID 213
Instrumenten-Desinfektion
Instrument disinfection
ID 215
Nettoyant enzymatique des instruments
Pulente enzimatico per strumenti



Orotol® plus
Sauganlagen-
Desinfektion
Suction system
disinfection



MD 555 cleaner
Spezialreiniger für Sauganlagen
Special suction cleaner

Solution prête à l'emploi Soluzione pronta all'uso	1 %		2 %		5 %	
	ml	Bouchon ¹⁾ tappo chiusura ²⁾	ml	Bouchon ¹⁾ tappo chiusura ²⁾	ml	Bouchon ¹⁾ tappo chiusura ²⁾
1 litre/litro	–	–	20	1	–	–
2 litres/litri	20	1	40	2	100	5
3 litres/litri	–	–	60	3	–	–
4 litres/litri	40	2	80	4	200	10
5 litres/litri	–	–	100	5	–	–
6 litres/litri	60	3	120	6	300	15
7 litres/litri	–	–	140	7	–	–
8 litres/litri	80	4	160	8	400	20
9 litres/litri	–	–	180	9	–	–
10 litres/litri	100	5	200	10	500	25

¹⁾Doseur de 20 ml intégré dans le bouchon. Remplir le doseur jusqu'au repère circulaire.

²⁾Tappo di chiusura con dosatore da 20 ml. Riempire il tappo dosatore sino al contrassegno.